

SUPPORTXTM

2x jährlich
erstattungs-
fähig*

Für Stomapatienten

Ihre Stomabandage für ein
selbstbestimmtes Leben



IHRE STOMABANDAGE FÜR EIN SELBSTBESTIMMTES LEBEN.

Viele Stomabetroffene kennen das: Sie möchten einige Zeit nach Ihrer Operation wieder aktiver am Leben teilnehmen. Dabei helfen Ihnen die Stomabandagen von Suportx. Sie sind sogar zweimal im Jahr durch eine Verordnung durch ihren Arzt erstattungsfähig und damit für Sie kostenfrei.

Warum sollte ich eine Stomabandage tragen?

Eine Stomaoperation verändert grundlegend die Stabilität Ihrer Bauchdecke, sogar, wenn Ihr Stoma nach einiger Zeit zurückverlegt wird. Die Stomabandage hilft....

- **ZUR HERNIENPRÄVENTION:** über 50% aller Stomapatienten entwickeln eine sogenannte Hernie*! Das Tragen einer gut sitzenden Stomabandage kann dies wirkungsvoll verhindern.
- **ZUR NACHSORGE:** Die Stomabandage fixiert Stomaplatte und Beutel im Alltag sicher und unterstützt postoperativ einen schnellen Heilungsprozess.
- **FÜR IHR SICHERHEITSGEFÜHL IM ALLTAG:** Viele Patienten sorgen sich, dass ihr Beutel nicht richtig sitzt, Leckagen auftreten oder ihr Stoma unter der Kleidung auffällig sichtbar ist.
- **BEI EINEM AKTIVEN ALLTAG:** die richtige Stomabandage passt sich Ihren Bedürfnissen an!

** Eine Hernie ist eine Ausstülpung von Organen oder Gewebe durch eine Schwachstelle in der umgebenden Muskelschicht. Hernien sind für Stomaträger ein relevantes Gesundheitsrisiko.*

Was sind die Vorteile einer Suportx Stomabandage?

Unsere Bandagen zur Hernienprävention wurden auf Basis breiter Forschung entwickelt und für unser wichtigstes Ziel: Ihr selbstbestimmtes Leben mit Stoma.

- **UNTERSTÜTZT IHR STOMA:** Unser in alle Richtungen dehnbares Material unterstützt die Stomafunktion wirkungsvoll bei der Entleerung in den Beutel.
- **SICHERT IHR STOMA:** Andere Systeme mit Öffnungen für die Stomaplatte schützen die sensibelsten Stellen Ihrer Bauchdecke in den meisten Fällen nur ungenügend.
- **KOMFORTABEL TRAGEN, AN- UND AUSZIEHEN:** Das spezielle Anti-Roll-Material trägt sich angenehm und hält die Bandage sicher am Platz.
- **PASST SICHER:** Verfügbar in verschiedenen Längen und Höhen sorgen unsere Bandagen für eine individuelle Passform und besten Tragekomfort auch bei leichten Gewichtsschwankungen.
- **HAUTFREUNDLICH UND WASCHBAR:** Das hautfreundliche, atmungsaktive Material stützt sanft, schonend und ist allergenfrei. Alle Bandagen sind waschbar bis 40°C.
- **MIT STIL:** Passend zu Ihrer Kleidung können Sie unter 3 verschiedenen Farben wählen: weiß, schwarz und beige. Auch mit Spitze erhältlich.



VIelfalt und Passende Lösungen für jeden Bedarf.

Entdecken Sie unsere hochwertigen Stomabandagen: Für maximale Bewegungsfreiheit und Komfort im Alltag. Mit speziellen Materialien und ergonomischem Design bieten wir diskrete Lösungen, die Sicherheit und Selbstbewusstsein fördern. Genießen Sie ein Leben ohne Einschränkungen.



EASY PEEL STOMABANDAGE mit Klettverschluss

Die benutzerfreundliche Easy Peel Bandage mit zuverlässiger Kompressionsfähigkeit, die den ganzen Körper stützt und die Lebensqualität verbessert. Besonders geeignet für Personen mit eingeschränkter Beweglichkeit.

- Studien zeigen, dass Bandagen ohne Öffnung gleichmäßigeren Druck und sichereren Halt bieten.
- Klettverschluss für besonders einfache, schnelle Handhabung. Einfacher Beutelwechsel ohne Öffnen des Easy Peel möglich!



TUBE STOMABANDAGE ohne Spitze

Die atmungsaktive Tube Stomabandage ist diskret und körperformend und bietet dem Tragenden Komfort und Selbstvertrauen.

- Stützt und kaschiert den Beutel
- Für alle Aktivitäten des Alltags
- Tube kann auch beim Schwimmen getragen werden!



TUBE LACE STOMABANDAGE mit Spitze

Die Tube Lace Stomabandage ist mit Spitze gefertigt und bietet dieselben Vorteile wie die Tube Stomabandage.

- Elegantes, feminines Spitzendesign
- Stützt und kaschiert den Beutel
- Für besondere Momente zu zweit

2x jährlich
erstattungs-
fähig*



WIE MESSE ICH MEINE GRÖSSE FÜR DEN RICHTIGEN SITZ?



Das Ausmessen Ihrer Stomabandage geht ganz leicht! Sie brauchen dazu nur entweder ein Maßband oder ein ausreichend langes Stück Schnur und einen Zollstock. Dann kann es schon losgehen!

Schritt 1

Messen Sie den Umfang, also die Breite, sowohl im Liegen als auch im Stehen. Das kleinere der beiden Maße ist maßgeblich für Ihre Bandagengröße.


Schritt 2

Legen Sie das Band oder Schnur um die breiteste Stelle des Körpers, an dem die Bandage getragen werden soll. Dies ist direkt über dem Stomabeutel. Das ist normalerweise über der Hernie/dem Stomabeutel. Halten Sie das Bandmaß ziemlich straff. (Siehe Abb. 1-2)

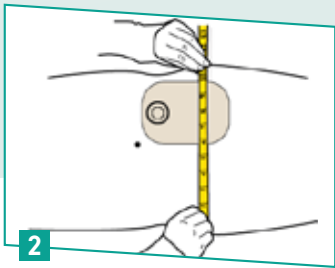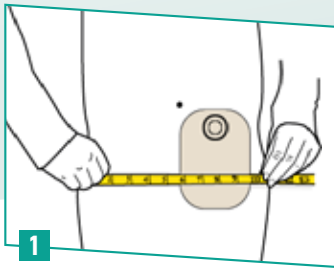

Schritt 3

Messen Sie nun die Höhe der Stomabandage im Sitzen. Stellen Sie fest, wo das obere Ende der Stomabandage positioniert werden muss. Dieser Punkt liegt 3 cm über dem oberen Rand des Beutels. Sobald die obere Position festgelegt ist, legen Sie das Band in einer geraden Linie am Körper entlang. Die Stomabandage sollte bis mindestens 3 cm unterhalb des Beutels reichen. (Siehe Abb. 3)

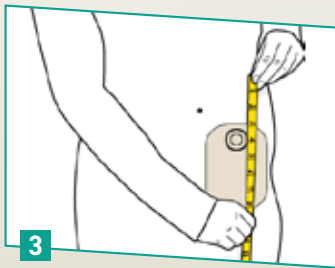

Schritt 4

Notieren Sie Breite und Höhe in Ihrer Bestellcheckliste! Jetzt fehlt nur noch die gewünschte Farbe – damit haben Sie Ihr Wunschprodukt! Ihre Bestellcheckliste erhalten Sie von Ihrem Ansprechpartner.

Verfügbare Größen unserer Bandagen:

GRÖSSE/UMFANG	HÖHE	FARBE
S 75-90 cm	15 cm	 beige
M 90-105 cm	20 cm	 schwarz
L 105-120 cm	26 cm	 weiß
XL 120-135 cm		
XXL 135-148 cm		

Ihr Ansprechpartner:



Sichern Sie sich jetzt Ihre nächste Stomabandage.

***Ihre Suportx-Stomabandage bekommen Sie in der Regel 2x jährlich als Kassenleistung erstattet.**

Wussten Sie schon? Aus hygienischen Gründen können bei Erstverordnung zwei Bandagen beantragt werden.

Ihr Ansprechpartner unterstützt Sie gerne dabei.